

Załącznik.

Peeling kawitacyjny

Peeling kawitacyjny to zabieg kosmetyczny wykonywany jest przez wykwalifikowane kosmetyczki. Na początku skóra jest lekko zwilżana, ponieważ ultradźwięki działają dopiero, gdy jest wilgotna. Nie wolno przykładać szpatełki do suchej skóry! Następnie przy użyciu specjalnego aparatu jest poddawana wibracjom. Fale ultradźwiękowe wędrują po twarzy, szyi i dekolcie za pomocą szpatełki.

Dane techniczne:

Natężenie prądu galwanicznego od -3,2 mA do 3,1 mA

Ultradźwięki od 0Hz do 24Hz

Moc – płynna regulacja do 30W

Wyposażenie aparatu

Łopatka do peelingu, opaska lub elektroda bierna, pedał – umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem, kabel zasilający.

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Sprzęt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i może być używany tylko przez profesjonalistów odpowiednim przygotowaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym posługiwaniem się sprzętem. Aparat jest zasilany napięciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru. Każde uszkodzenie należy niezwłocznie zgłosić do serwisu.

Nigdy nie przykładaj szpatełki do suchej skóry, może dojść do oparzenia!

W okolicy oczu, oraz innych delikatnych miejsc, ustaw urządzenie na najniższą moc.

Przygotowanie aparatu do pracy

1. Ustaw aparat na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Podłącz przewód sieciowy do aparatu i gniazdka sieciowego.
3. Podłącz pedał, łopatkę i opaskę do właściwych gniazd zasilających.
4. Włącz kombajn przyciskiem z tyłu.
5. Ustaw odpowiednie parametry.
6. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Kroki do rozpoczęcia pracy urządzenia

Istnieją dwa sposoby ustawiania funkcji:

1. Szybki – z automatycznym ustawieniem parametrów.

1.1 Klawiszem sterującym wybierz funkcję peeling kawitacyjny i naciśnij start.




2. Ręczne ustawienie parametrów.

2.1. Wybierz funkcję peeling kawitacyjny i naciśnij klawisz menu.

2.2. Klawiszem sterującym wybierz kolor światła w szpatułce i zatwierdź klawiszem menu.



2.3. Klawiszem sterującym nastaw czas - zatwierdź klawiszem menu.

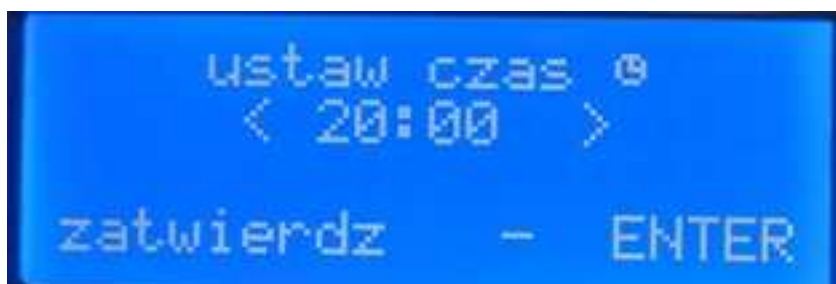

2.4. Ustaw puls za pomocą klawiszy sterowania - zatwierdź klawiszem menu.



Możesz pracować bez pulsacji, w tym celu zatwierdź klawiszem menu puls OFF.

2.5. Klawiszami sterującymi ustaw natężenie prądu galwanicznego - zatwierdź klawiszem menu.



2.6. Ekran roboczy.



2.7. W celu rozpoczęcia zabiegu naciśnij start. W dowolnym momencie możesz przerwać zabieg włączając klawisz stop. Zegar zatrzyma się, a po ponownym włączeniu start możesz kontynuować pracę bez konieczności regulacji parametrów.

Konserwacja urządzenia.

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Obudowę, kable i szpatułkę należy czyścić miękką szmatką, nawilżoną wodą z mydłem.

Podczas czyszczenia należy uważać aby woda nie dostała się do wnętrza. Zakończenie szpatułki przemyć roztworem odkażającym.